


DIRECT PLASMA

直接等離子體(紫燈)
需快速清潔和去除表面污染物



VORTEX PLASMA

渦流等離子體(藍燈)
利用渦流效應在閉合環境中處理

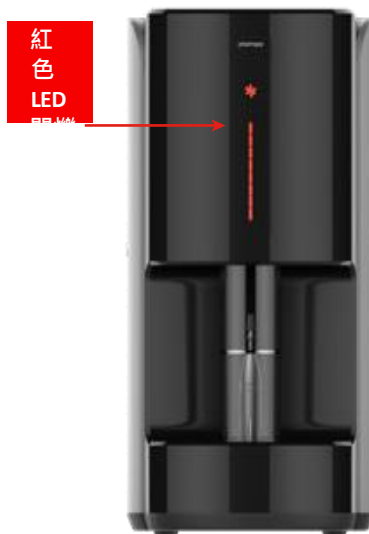

根據產品使用次數顯示前面LED狀態

- 產品使用次數確認方法
長按上部的啟動按鈕 (6秒以上) ,根據產品前面使用次數 ,綠色LED會閃爍。
- 產品使用次數顯示方法
使用次數每增加500次 ,綠色LED閃爍數增加1格。
- 如果相應零件的更換壽命少於100次 ,則每次產品通電時都會發出“更換提示音”。
- 超過產品使用次數後 ,工程開始時 ,產品前面顯示“紅色LED閃爍”狀態 ,產品無法運轉。

錯誤顯示及處置方法

顯示錯誤	錯誤內容	確認及措施方法
1個紅色LED點亮	真空管運轉不良	電源OFF後重新啟動時 ,產品動轉將初始化。
3個紅色LED點亮	真空壓力異常	請去除真空管與底面之間的異物後 ,重新啟動。如果持續發生錯誤 ,請諮詢銷售負責人。 確認真空管破裂或彎曲等時 ,請諮詢銷售負責人。
5個紅色LED點亮	等離子體電源異常	電源OFF後重新啟動時 ,產品動轉將初始化。如果持續發生錯誤 ,請諮詢銷售負責人。

※用戶檢查及採取措施後仍存在相同現象時 ,請諮詢銷售負責人。